

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## INTRODUCCION

---

Gracias por elegir un producto de Somartec Factoría. Lea y siga todas las instrucciones del manual de uso, especialmente los consejos de seguridad y ajustes antes de utilizar el producto adquirido. Si tiene alguna duda sobre su utilización, mantenimiento o seguridad, consulte con su distribuidor autorizado.

Somartec Factoría declara bajo su responsabilidad que este producto cumple con los requisitos de la directiva médica 93-42-CEE de la directiva 2007-47-CEE

MARCADO CE

## USO INDICADO

---

Este producto está indicado como ayuda técnica al usuario y/o cuidador.

Uso exclusivo en espacios interiores.

Peso máximo del usuario 180 kg.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

---

-Utilice siempre el producto conectado a una fuente de alimentación de la misma tensión, frecuencia y régimen de servicio que el indicado en la placa del producto y/o motor eléctrico que da servicio al conjunto.

-El producto no debe ser utilizado por personas que presenten capacidad física, sensorial o mental reducidas, o bien con falta de experiencia y conocimientos a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

-No use el producto si está dañado o presenta signos de funcionamiento defectuoso. No utilice el producto con un cable dañado. Devuelva el producto completo al lugar donde lo adquirió para su inspección, reparación, reembolso o sustitución.

Si no funciona correctamente debe ponerse en contacto con el suministrador.

-Este producto no debe utilizarse cerca del agua, donde se puedan producir inmersiones o salpicaduras.



-

- Apague y desconecte el producto de la toma de alimentación eléctrica cuando no se utilice, antes de montar el conjunto completo, antes de desmontarlo y antes de su limpieza.
- No introduzca partes del cuerpo (por ejemplo: dedos, manos...) entre el bastidor y los planos articulados cuando se proceda a la manipulación y movimiento del conjunto.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto puede causar peligros o lesiones personales o daños a la propiedad.
- Este producto ha sido diseñado para su uso normal en hogares, centros sanitarios, residencias, hospitales, etc., diseñado para el uso y disfrute de todo tipo de personas, aunque se haya pensado fundamentalmente para personas con ciertas limitaciones de movimiento.

#### LIMPIEZA DEL PRODUCTO

---

- Desenchufe el producto antes de realizar la limpieza del mismo.
- Mantenga los conductos de ventilación y partes del motor eléctrico libres de polvo y pelusas.
- No utilice objetos puntiagudos para limpiar aberturas u otras partes.
- No permita que cualquier líquido entre a la caja del motor.
- Se recomienda utilizar productos limpiadores domésticos habituales.

#### DURABILIDAD

---

La vida útil del producto es como mínimo de 5 años. Esta vida se alarga considerablemente dependiendo del uso adecuado que de él se haga, de un mantenimiento periódico y del seguimiento de estas instrucciones.

#### GARANTIA

---

Somartec Factoría garantiza este producto por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura o ticket de compra.

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Daños ocasionados durante la instalación, propios del montador no siendo este asignado por la empresa.
- Uso inapropiado del producto.
- Falta de mantenimiento.
- Modificaciones o reparaciones hechas por personas ajenas a Somartec Factoría.